



Ligaflex Manu Pols

Eigenschappen:

Polsbrace waarmee de duim en de pols worden geïmmobiliseerd m.b.v. twee röntgen transparante vormpassende baleinen).

Verbeterd comfort door 3D weefsel.

Het systeem met een dubbele riem garandeert een homogene steun.

Indicaties:

Lichte verstuiking van pols en/of duim (functionele behandeling).

Ernstige verstuiking van de duim en breuk van de scaphoïdum (postoperatieve behandeling).

Peesontsteking en tendinopathie van pols en duim.

Ontstekende fasen van reumatische pathologiën.

Aanbevelingen bij het plaatsen van het artikel:

Zorg bij aantrekken dat alle banden los zijn.

Laat de Ligaflex Manu om uw hand glijden en plaats uw duim in daarvoor bestemde opening, tot de brace op zijn plaats zit.

Bevestig de enkele band om uw onderarm middels de spangesp.

Bevestig de dubbele band om uw pols.

Bevestig de enkele band om uw duim.

U heeft de mogelijkheid om met de dubbele banden de druk te verplaatsen. Hiermee kunt u het comfort verhogen.

Voorzorgsmaatregelen:

De aanbevelingen volgen van de leverancier, die het artikel heeft voorgeschreven of geleverd.

In geval van ongemak, deze leverancier raadplegen. Opbergen op kamer temperatuur, bij voorkeur in de originele doos.

Wegens mogelijke problemen met hygiëne en functioneren, raden we u sterk af om dit product te hergebruiken voor de behandeling van een andere patiënt.

Onderhoud:

De spalk verwijderen alvorens de polsbrace te wassen.

Uitsluitend met de hand wassen op 40°C met een fijnwasmiddel zonder bleekmiddel of wasverzachter.

Van water ontdoen door te persen, niet wringen.

Drogen buiten bereik van een warmtebron.

Samenstelling:

Polyamide 62%

Polyester 34%

Katoen 3%

Elastan 1%

Kleur:

Beige

Zwart

Twee versies:

Rechts

Links

www.braceadvies.nl

R. de Vries

Fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut, Podoloog