



# Lombox Activity

## Eigenschappen:

De lendegordel kan op de momenten dat er minder krachtinspanning van de wervelkolom geveerd wordt, losgemaakt worden, terwijl de schouderbanden ervoor zorgen dat de gordel op zijn plaats blijft.

Harde, comfortabele baleinen aan de achterkant.

Geoptimaliseerd comfort voor de rug met masserend effect.

Extra banden voor aanpassing van het rugsteunniveau.

Lus om het plaatsen van het product te vergemakkelijken.

## Indicaties:

Initiale ondersteuning bij lumbalgie en ischialgie.

Preventie van lumbalgie (inspanningen, gebrekkige lichaamshouding), in het bijzonder bij actieve personen die aan intermitterende overbelasting van de wervelkolom zijn blootgesteld.

Ondersteuning van de lende na chirurgische ingreep.

## Aanbevelingen bij het plaatsen van het artikel:

### Plaatsing voor de eerste keer:

Het klittenband aan de zijkant losmaken.

De gordel aandoen met het etiket naar boven.

Met behulp van de lus, de lip met klittenband aan de buikzijde sluiten door de gewenste steun af te stellen.

De rugsteun afstellen door op de voorkant de extra laterale banden met behulp van de lussen af te stellen.

De bretels op hun plaats zetten en afstellen.

### Daarna iedere keer:

De gordel aan- en uitdoen door de lip aan de buikzijde vast en los te maken.

Als blokkeren tijdelijk niet meer nodig is, is het mogelijk de gordel aan te houden dankzij de bretels.

## Voorzorgsmaatregelen:

De aanbevelingen volgen van de leverancier, die het artikel heeft voorgeschreven of geleverd.

Het kan nodig zijn aan de baleinen een vorm te geven. In geval van ongemak, deze leverancier raadplegen.

Opbergen op kamertemperatuur, bij voorkeur in de originele doos.

Wegens mogelijke problemen met hygiëne en functioneren, raden we u sterk af om dit product te hergebruiken voor de behandeling van een andere patiënt.

## Onderhoud:

Uitsluitend met de hand wassen op 40°C met een fijnwasmiddel zonder bleekmiddel of wasverzachter.

Van water ontdoen door te persen, niet wringen.

Drogen buiten bereik van een warmtebron.

## Samenstelling:

Polyester 63%

Elastodiene 28%

Viscose 9%

## Kleur:

Grijs

[www.braceadvies.nl](http://www.braceadvies.nl)

R. de Vries

Fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut, Podoloog