


GENU PRO ACTIV

Knieverband voor de knieschijf met versterkte proprioceptieve werking

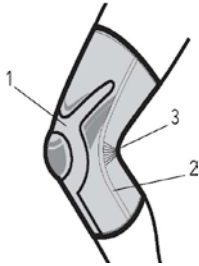

Eigenschappen:

- Knieverband van elastisch 3D weefsel.
- Y-vormige inserts voor een betere proprioceptieve werking en een versterkte intermitterende stimulatie van het gewricht. (1)
- Geïntegreerde laterale verstevigingen. (2)
- Gevormd weefsel met hoge elasticiteit voor comfort de knieholte. (3)

Indicaties:

- Posttraumatische, postoperatieve en chronische irritaties.
- Fibromyalgie en verstuikingen van de laterale gewrichtsbanden.
- Artrose en artritis.
- Niet-ernstige gewrichtsinstabiliteit.
- Pathologiën van de knieschijf.

Aanbevelingen bij het plaatsen van het artikel:

Controleren dat de knieschijf zich zo nauwkeurig mogelijk in het midden van de knieschijfing bevindt. Het knieverband volkomen strak op het been plaatsten.

Voorzorgsmaatregelen:

De aanbevelingen volgen van de leverancier, die het artikel heeft voorgeschreven of geleverd. In geval van ongemak, deze leverancier raadplegen. Opbergen op kamertemperatuur, bij voorkeur in de originele doos. Wegens mogelijke problemen met hygiëne en functioneren, raden we u sterk af om dit product te hergebruiken voor de behandeling van een andere patiënt. Mocht dit toch gebeuren, dan valt het hergebruik volledig onder de verantwoordelijkheid van wie die beslissing genomen heeft en dan vervalt automatisch de garantie van Thuasne.

Onderhoud:

- Uitsluitend met de hand wassen op 40°C met een fijnwasmiddel zonder bleekmiddel of wasverzachter.
- Van water ontdoen door te persen, niet wringen.
- Drogen buiten bereik van een warmtebron.

Samenstelling:

- Polyamide 70%
- Elastodiene 22%
- Elastan 8%

Kleur:

- Wit
- Lichtgrijs
- Zwart

Uitleg van de proprioceptieve werking:

Onze orthesen van de PRO serie (Proprioceptive Response Orthoses / Orthesen met proprioceptief antwoord) zijn speciaal ontwikkeld om de proprioceptie te versterken en de gekwetste receptoren te vervangen. Zij verhogen tevens de druk op de gewrichten gedurende de bewegingen voor een optimale steun.

Maatschema:

Omvang: dijbeen - kuit		Maat
35 - 38 cm	25 - 28 cm	1
38 - 41 cm	28 - 31 cm	2
41 - 44 cm	31 - 34 cm	3
44 - 47 cm	34 - 37 cm	4
47 - 51 cm	37 - 41 cm	5
51 - 55 cm	41 - 45 cm	6
55 - 59 cm	43 - 47 cm	6+

N.B. : In geval de twee genomen maten niet overeenstemmen met een corresponderende maat, moet de maat gekozen worden die overeenstemt met de omtrek (b).

www.braceadvies.nl webwinkel

www.fysiodevries.nl praktijk voor fysiotherapie

www.shockwavepraktijk.nl Shockwave therapie

www.kinderfysiotherapiepingewaai.nl kinderrfysiotherapie

R. de Vries

Fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut, Podoloog