



LIGAFLEX EVOLUTION

Verstevigd bi-axiaal
ligamentair knieverband

Eigenschappen:

- Elastisch weefsel in twee richtingen rekbaar.
- Versterkte zijpanden met bi-axiale scharnier. (1)
- Een lip in het midden om de laterale verstevigingen op hun plaats te houden. (2)
- Dubbele verstelbare band boven en onder (anti-afklemmeffect). (3)
- Grote opening voor comfort in de knieholte. (4)
- Opening voor de knieschijf met siliconenring. (5)

Indicaties:

- Orthopedische behandeling van eenvoudige of gecompliceerde verstuikingen.
- Ondersteuning na chirurgische behandeling en tijdens de revalidatie.
- Functionele ondersteuning bij hyperlaxiteit.

Aanbevelingen bij het plaatsen van het artikel:

- Open de brace (alleen van toepassing bij de open versie).
- Plaats hem onder de (licht gebogen) knie.
- Sluit eerst de klittenbandjes boven en onder aan de brace.
- Kijk na of de brace op de juiste plaats zit in verhouding tot de knieschijf.
- Sluit de dubbele banden aan voor- en achterzijde.

Voorzorgsmaatregelen:

Opbergen op kamertemperatuur, bij voorkeur in de originele doos.

Onderhoud:

- Bij voorkeur voor het wassen de zijkanten verwijderen. Het knieverband buigen om deze weer op hun plaats te zetten.
- Uitsluitend met de hand wassen op 40°C met een fijnwasmiddel zonder bleekmiddel of wasverzachter.
- Van water ontdoen door te persen, niet wringen.
- Drogen buiten bereik van een warmtebron.

Samenstelling:

- Viscose 60%
- Elastan 28%
- Polyester 12%

Kleur:

- Zwart

Maatschema:

1	32 - 34 cm
2	35 - 37 cm
3	38 - 41 cm
4	42 - 45 cm
5	46 - 49 cm
6	50 - 53 cm

www.braceadvies.nl webwinkel

www.fysiodevries.nl praktijk voor fysiotherapie

www.shockwavepraktijk.nl Shockwave therapie

www.kinderfysiotherapielingewaal.nl kinderfysiotherapie

R. de Vries

Fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut, Podoloog